

Pluma Wegovy FlexTouch (ejemplo)

Nota: El tamaño de su pluma y el color de la etiqueta pueden diferir de la que se muestra en las imágenes.

Estas instrucciones aplican a todas las plumas Wegovy FlexTouch.



Aguja NovoFine Plus (ejemplo)



Instrucciones sobre cómo utilizar la pluma Wegovy

Lea atentamente estas instrucciones antes de empezar a utilizar su pluma Wegovy FlexTouch semanal y consulte con su médico, enfermero o farmacéutico sobre cómo inyectar Wegovy correctamente.

La pluma Wegovy es una pluma dosificadora que **contiene sus cuatro dosis prescritas de Wegovy, que corresponden a las cuatro administraciones de uso semanal.**

Utilice la tabla que se encuentra en el interior de la cubierta del embalaje exterior para llevar el seguimiento de cuántas inyecciones ha usado y cuántas dosis quedan en la pluma.

Wegovy se presenta en cinco plumas diferentes, cada una de las cuales contiene una de las siguientes dosis prescritas de semaglutida:

0,25 mg

0,5 mg

1 mg

1,7 mg

2,4 mg

Compruebe siempre la etiqueta de la pluma para asegurarse de que contiene la dosis de Wegovy prescrita.

Su pluma está diseñada para utilizarse con agujas desechables de 30G, 31G y 32G de hasta 8 mm de longitud.

El envase contiene:


- Pluma Wegovy
- 4 agujas NovoFine Plus
- Prospecto

1 Prepare la pluma con una nueva aguja

Compruebe el nombre y la concentración de su pluma para asegurarse de que contiene la dosis recetada de Wegovy.

Retire el capuchón de la pluma.


(Ver figura A).

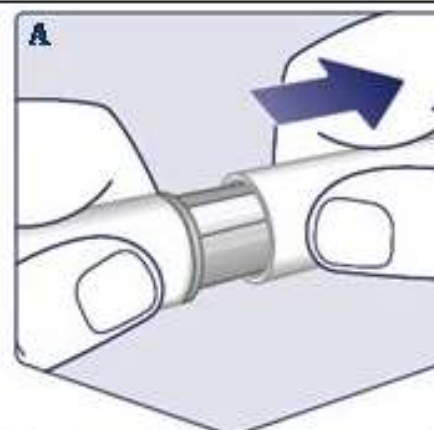

Compruebe que la solución de su pluma es transparente e incolora.

Mire a través de la ventana de la pluma. Si Wegovy tiene un aspecto turbio o coloreado, no utilice la pluma.

(Ver figura B).

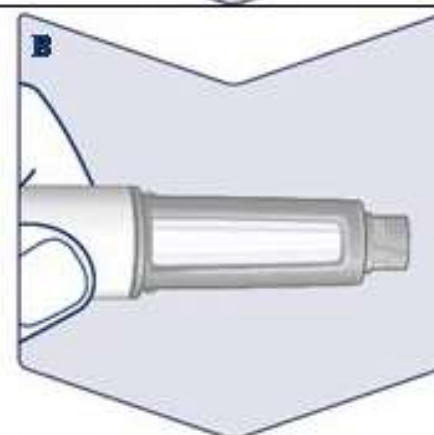

Utilice siempre una aguja nueva para cada inyección.

Coja una aguja cuando esté preparado para ponerse la inyección. Compruebe que la lengüeta de papel y el capuchón exterior de la aguja no presentan daños que puedan afectar a la esterilidad. Si detecta algún daño, utilice una aguja nueva.


Retire la lengüeta de papel.

(Ver figura C).



Coloque la aguja recta en la pluma. Enrósquela hasta que quede apretada.

(Ver figura D).

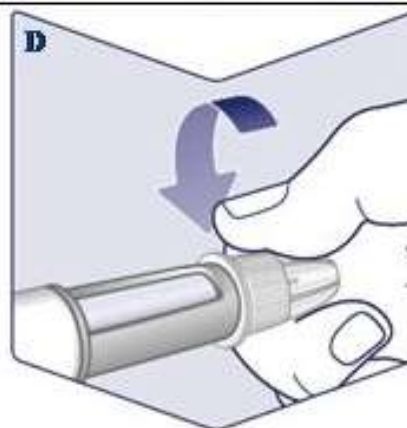

La aguja está cubierta por dos capuchones. Debe retirar ambos capuchones.

Si se olvida de quitar los dos capuchones no se inyectará Wegovy.


Retire el capuchón exterior de la aguja y guárdelo para más tarde.

Lo necesitará después de la inyección para retirar la aguja de la pluma de forma segura.

Retire el capuchón interior de la aguja y deséchelo. Puede aparecer una gota de Wegovy en la punta de la aguja. Debe seguir comprobando el flujo de Wegovy si utiliza una pluma nueva por primera vez. Ver **“Compruebe el flujo con cada pluma nueva”**.

No utilice nunca una aguja doblada o dañada. Para obtener más información sobre cómo manipular las agujas, consulte la sección **“Acerca de las agujas”** que se encuentra a continuación de estas instrucciones.

(Ver figura E).

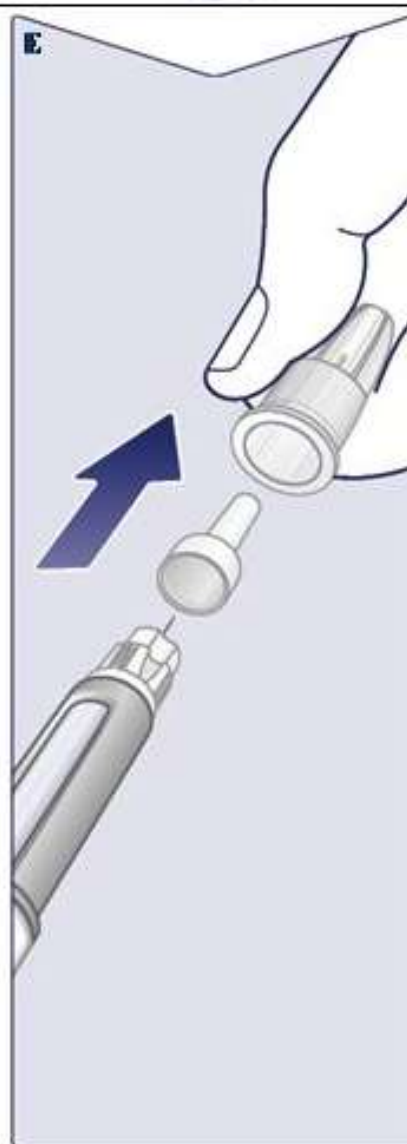

Compruebe el flujo con cada pluma nueva

Si su pluma Wegovy ya está en uso, vaya a “2 Selección de la dosis”.

Compruebe el flujo de Wegovy solo antes de la **primera inyección con cada pluma nueva**.

Gire el selector de dosis hasta ver el símbolo de comprobación de flujo (•• —).

(Ver figura F).

